



DOMAINE D'APPLICATION

Ce document s'applique aux pré-indications maladies rares et oncogénétique constitutionnelle.

LIEU DE RÉCEPTION

La plateforme de séquençage à très haut débit du LBMMS SeqOIA se situe au **RDC Bas du Bâtiment Leriche Site Broussais, rue Huguette Schwartz 75014 PARIS.**

CONSIGNES RELATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS DE SANG VEINEUX

- Les prélèvements sanguins congelés ne seront pas acceptés.
- Le personnel réalisant les prélèvements pour les examens de biologie médicale réalisés par le LBMMS SeqOIA doivent disposer des diplômes et des qualifications nécessaires (Cf. Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale).
- Conformément à la législation, le préleveur doit s'identifier sur la fiche de prescription (Voir le logiciel de e-prescription SPICE). Cette identification est systématiquement vérifiée à réception des échantillons et son absence est enregistrée et fait l'objet d'une non-conformité pré-analytique.
- Avant de réaliser le prélèvement, l'identification du patient doit être vérifiée. Le préleveur s'assure de la concordance entre l'identité du patient et les mentions d'identification renseignées sur la fiche de prescription. Il doit demander au patient de décliner son identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms et date de naissance.
- Le prélèvement de sang veineux est réalisé sur tube EDTA – bouchon violet.
 - Le volume de sang pour les adultes est de 4 à 6 ml
 - Le volume de sang pour les enfants est de 2 à 3 ml

L'utilisation des tubes dont les références sont citées ci-dessous sont indispensables à l'identitovigilance et à l'automatisation de la plateforme SeqOIA :

		Référence produit (UGAP)
Tubes Adulte		
BD	6 ml BD Vacutainer® whole blood, K2-EDTA, 13 x 100 mm	367864
BD	4 ml BD Vacutainer® whole blood, K2-EDTA, 13 x 75 mm	368861
Tubes Pédiatrie		
Sarstedt	2.6 ml S-Monovette® K2-EDTA, 13 x 65 mm	4.1900.100

- L'identification des échantillons doit toujours être effectuée par le préleveur au moment du prélèvement. En aucun cas, les échantillons ne doivent être identifiés avant que le prélèvement n'ait été effectué.
- Le préleveur colle les étiquettes identifiantes du patient sur le tube et sur la feuille de prescription.



- L'étiquette doit comporter :
 - Nom de naissance
 - Nom d'usage
 - Prénoms
 - Date de naissance
 - Sexe
- Le préleveur doit remplir l'encart qui lui est réservé sur la feuille de prescription (cf. ci-dessous).
- Les prélèvements sanguins doivent parvenir au LBMMS SeqOIA dans les meilleurs délais et dans tous les cas moins d'une semaine après le prélèvement.
- Ils peuvent être conservés avant envoi à température ambiante.



SITE DE BROUSSAIS – Bât. LERICHE
14 rue Maria Helena Vieira Da Silva
RAMPE D'ACCES, RUE HUGETTE SCHWARTZ
Paris 75014

PRESCRIPTION



Médecin Prescripteur (cas index)

ID RPPS :

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-Mail :

Téléphone :

Établissement :

Adresse établissement :

Examen

Type de pathologie : Maladies Rares

Indication : Indication

Examen : WGS Trio

Patient

ID Patient :

Nom usuel :

Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance :

Sexe : Homme

Préleveur

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Établissement :

Date et signature :

Informations pour le prescripteur : spice-prescription@bioinfo.aphp.fr

Laboratoire autorisé à exercer l'activité de soins « examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales »
(Décision n°2019-885 du Directeur Général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France)

EMBALLAGE – SAC Diagnobag®

- Le sac Diagnobag® (taille A5 homologué UN3373 avec absorbant) a deux poches distinctes :
 - Dans la partie scellable insérer les prélèvements sanguins.
 - Dans la poche externe insérer la feuille de prescription imprimée par le prescripteur via le logiciel de e-prescription SPICE.
- L'identité concernant la prescription ne doit pas être visible.





Notes :

- Sur demande anticipée, le sac Diagnobag® peut être mis à disposition par le LBMMS SeqOIA.
- Plusieurs prescriptions peuvent être envoyées dans le même colis, mais **une seule prescription par sac Diagnobag®.**

ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS SANGUINS VIA LE TRANSPORTEUR BIOLOGISTIC®

I. DEMANDE D'ENLÈVEMENT DES PRELEVEMENTS SANGUINS

Les prélèvements sanguins sont acheminés au LBMMS SeqOIA par le transporteur BioLogistic®, prestataire du LBMMS SeqOIA.

Vous devez disposer d'un compte BioLogistic®.

Cf. Instruction de demande de création d'un compte BioLogistic® SeqOIA (SeqOIA-PRE-IT-002) et prendre contact par mail : biologicistic.seqoia@aphp.fr

Le contact référent du compte BioLogistic® dispose d'un identifiant et d'un mot de passe pour ce compte et a la charge d'organiser la demande d'enlèvement. A noter que si le compte dispose de plusieurs adresses d'enlèvement, il faut veiller à sélectionner la bonne adresse d'enlèvement.

La commande de transport auprès de BioLogistic® doit être réalisée :

- Au minimum 24h avant le jour de l'enlèvement et dans tous les cas avant 16h.
- Au maximum 10 jours avant le jour de l'enlèvement.


II. CRÉER UNE COMMANDE DE TRANSPORT

Le contact référent du compte en charge de l'envoi crée une nouvelle **commande de transport** via son compte extranet BioLogistic® :

1. Se connecter sur l'application BioLogistic® : <http://bio.biologicistic.fr>
2. Saisir votre identifiant et votre mot de passe et demander une commande de transport :
3. Renseigner le site de livraison :



Créer une nouvelle commande

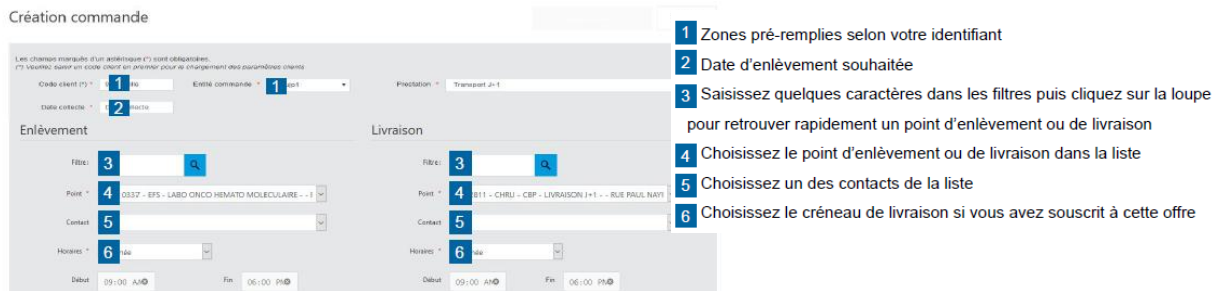

* Champs obligatoires

Notes : Les informations concernant le site de livraison sont pré-remplies.



Le référent du compte renseigne les items « Enlèvement » :

- Indiquer la date d'enlèvement souhaitée 2
- Sélectionner l'adresse d'enlèvement si le compte contient plusieurs adresses. Si le compte n'a qu'une adresse d'enlèvement, elle apparaît par défaut. 4
- Choisir le créneau d'enlèvement qui est par défaut entre 9h-18h ou à titre exceptionnel le vendredi après-midi de 13h à 18h.

4. Ajouter ensuite un colis à votre expédition :

Ajouter des colis

Quantité * <input type="text" value="1"/>	Température * Ambiant	Volume * <input type="text" value="4L"/>	Emballage * <input type="text" value="BioLogistic"/>
Masse (grammes) <input type="text" value="0"/>	Dimension (mm) <input type="text" value="0"/>	Dimension (mm) <input type="text" value="0"/>	Dimension (mm) <input type="text" value="0"/>
Alias géopost <input type="text" value="Alias géopost"/>		Carboglace <input type="checkbox"/>	UN3373 <input type="checkbox"/>
Commentaire <input type="text" value="Commentaire"/>			

Valider colis

Synthèse des éléments à remplir :

	ADN
Quantité de colis	1
Température	Ambiante (T°C de suivi du véhicule)
Volume	4L
Emballage	BioLogistic®
Case à cocher	Aucune

Notes :

- *Le champ commentaire permet de donner des précisions de livraison qui pourraient aider le chauffeur. Aucun horaire d'enlèvement ou de livraison ne sera pris en compte.*
- *Vous pouvez ajouter ou supprimer un colis jusqu'à 16h la veille de l'enlèvement.*
- *La prestation BioLogistic® comprend le transport à température ambiante + le contenant.*

5. Validation de la commande et impression du bon de livraison :

- Le référent du compte valide la commande.

Validation de la commande

La commande numéro 1621311 contenant les colis (JP140596319) a bien été enregistrée.

A4
 A6

Imprimer les BL



- Le référent du compte imprime le **bon de livraison à remettre au transporteur BioLogistic®**.
- Il vérifie que l'adresse et la date d'enlèvement sont correctes.



BioLogistic chronopost		
N° de scellé : 131010		
Enlèvement - Date d'enlèvement	Livraison - Date de livraison	
	GCS SEQOIA RUE HUGUETTE SCHWARTZ 75014 PARIS	
Contact: Bouffé Aude / Louisa Mayer Tél : 05.61.54.99.04 / 06.72.90.75.22	Contact: Bouffé Aude / Louisa Mayer Tél : 05.61.54.99.04 / 06.72.90.75.22	
4L		
En cas d'accident ou d'incident durant le transport, prévenir immédiatement l'expéditeur		

Exemple de bon de livraison

III. ENLÈVEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

Le contact référent du compte BioLogistic® ou la personne en charge de l'envoi dépose le ou les sacs Diagnobag® dans le contenant de 4 litres apporté par le transporteur BioLogistic®. Il scelle le colis et remet au transporteur le bon de livraison.



Contenant de 4L

Note : Le transporteur ne manipule pas les prélèvements.

ACCEPTATION D'UN ÉCHANTILLON À RÉCEPTION

Le non-respect des conditions indiquées dans ce document peut conduire à l'annulation de la demande de STHD.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux règles d'hygiène et sécurité en vigueur et utiliser les équipements de protection individuelle qui conviennent.